



Fust. 2751

# Evolstin®

## Warzenvereiserspray

330002623

**Ingredients:** Butane, Propane, Isobutane, Dimethyl Ether

**Inhalt:** 75 ml Sprühdose und 12 Einweg-Schwämme

**Hersteller:**  
COSMOSOL S.r.L.  
P.za S. Fedele, 4  
20121 Mailand  
Italien

**Hergestellt für:**  
Evolstin medical UG  
Schlehenweg 7  
61267 Neu-Anspach  
Germany

**Onlineshop:**  
[www.evolstin-medical.com](http://www.evolstin-medical.com)

PZN 17847835

**REF** 410003251


**LOT**

Siehe Faltschachtelboden  
Rev. 08/2021

CE 0546



GEFAHR

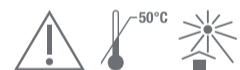

**3** **110**  
**75 ml e**

# Evolstin®

## Warzenvereiserspray

### Entfernt Warzen

### Vereist die Warze an der Wurzel

- ✓ Für Hand - & Fußwarzen
- ✓ 12 Anwendungen
- ✓ Einfache Handhabung
- ✓ Entfernt Warzen mit einer Anwendung



Medizinprodukt

75 ml e

#### Warnhinweise:

Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten. Extrem entzündbares Aerosol. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50°C aussetzen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Bei nicht ausreichender Belüftung können explosionsfähige Gemische entstehen. Nach Gebrauch gut lüften. Vor der Entsorgung der Spraydose darauf achten, dass diese vollständig entleert ist.

Nicht in die Augen sprühen. Bei Augenkontakt gründlich mit Wasser und physiologischer Kochsalzlösung spülen. Das Produkt nur auf Warzen anwenden. Das Produkt nicht ohne Applikator aufbringen. Auf keinen Fall die gleiche Warze mehr als 4-mal mit dem Produkt behandeln. Für jede Warze muss ein neues Schwämmchen verwendet werden. Das Produkt darf bei Diabetes nicht angewendet werden. Das Produkt darf bei Kindern unter 4 Jahren nicht angewendet werden. Mit dem Produkt dürfen keine anderen Hautveränderungen als Warzen behandelt werden. Sollten Zweifel über die Art der zu behandelnden Hautveränderung bestehen, sollte vor der Behandlung ein Arzt aufgesucht werden. Bei unsachgemäßem Gebrauch kann es zu Verbrennungen und Schädigungen von gesundem Gewebe kommen. Sollte Flüssiggas auf das Gewebe um die Warze herum tropfen, ist die Behandlung unverzüglich abzubrechen; das Flüssiggas mit einem sauberen Tuch aufsaugen und einen Arzt aufsuchen. Das Produkt darf nicht ohne das Schwämmchen aufgebracht werden. Die Gebrauchsanweisung ist genau zu befolgen.

Den Umkarton und die Packungsbeilage bis zum vollständigen Verbrauch des Sprays aufbewahren.

In der Regel ist eine einmalige Behandlung ausreichend; bei tiefsitzenden Warzen sind 2-3 zusätzliche Anwendungen erforderlich.

#### SERVICE HOTLINE

Bei Problemen oder mit Anregungen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: [support@evolstin-medical.com](mailto:support@evolstin-medical.com)



Zum Video

Einfach den QR Code scannen und das Anwendungsvideo ansehen!

#### Wirkungsweise - Kryotherapie:

Basierend auf dem Prinzip der Vereisung entfernt das Evolstin Warzenvereiserspray gewöhnliche Warzen und Dornwarzen. Durch die Kryotherapie werden Warzen mittels extremer Kälte behandelt und entfernt. Hierdurch werden eine Vereisung und Ablösung der Warzen verursacht. Die 12 Applikatoren sorgen für eine wirksame und einfache Anwendung des Produkts. Dornwarzen treten an den Belastungsstellen des Fußes unterhalb des Fußgewölbes auf. Sie können hart und sehr druckschmerzhaft sein. Gewöhnliche Warzen bilden sich hingegen an Händen, Ellenbogen, Knien und im Gesicht. Warzen sind das Ergebnis einer Hautwucherung, die in Form eines Hautauswuchses erscheint. Sie sind nicht nur unästhetisch, sondern bei direktem Kontakt auch ansteckend.

#### Anwendung:

1. Die Schutzkappe des Sprühkopfes entfernen.
  2. Das Schwämmchen bis etwas über die Hälfte in die dafür vorgesehene Öffnung stecken.
  3. Die Schutzkappe ohne Druck wieder aufsetzen, so dass die blauen Flügel sichtbar bleiben.
  4. Die Spraydose auf den Kopf stellen und mit der Kappe 3-5 Sekunden auf eine stabile Oberfläche drücken, damit sich das Schwämmchen mit dem Produkt trinkt.
  5. Die Spraydose weitere 10-15 Sekunden über Kopf halten.
  6. Die Schutzkappe entfernen und die Spraydose dabei weiterhin über Kopf halten. Stellen Sie sicher, dass der Applikator nicht tropft. Erst dann das Schwämmchen auf die Warze aufbringen. Bei Tropfenbildung das überschüssige Flüssiggas mit einem sauberen Tuch aufsaugen; darauf achten, dass die Hände nicht mit dem Gas in Berührung kommen.
  7. Das getränkte und nicht tropfende Schwämmchen ohne Druck maximal 40 Sekunden lang auf der Mitte der Warze aufsetzen. Während dieser Zeit die Kappe nicht drücken.
  8. Die Warze löst sich nach ca. zwei Wochen.
- Bei tiefsitzenden Warzen sind 2-3 zusätzliche Behandlungen nötig; dabei ist ein Abstand von zwei Wochen zwischen den einzelnen Behandlungen einzuhalten. Sind viele Warzen vorhanden, ist jeweils nur eine zu behandeln, immer mit Abständen von zwei Wochen zwischen jeder Behandlung und zwischen jeder Warze.



A3



4 260600 590172

LOT

